


# Ringtäcket

# Information

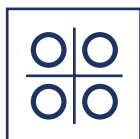

Ringtäcket från Sleepify är utformat med en mjukare, vadderad sida och en sida där ringarna ger ett mer påtagligt tryck mot kroppen. Vilket som fungerar bäst är individuellt - testa dig fram!



Använd alltid ett påslakan över ditt tyngdtäcke.



Du kan med hjälp av dragkedjan som delar täcket i två delar även bilda en lite mindre tyngd-filt som du enkelt kan ha på dagen eller när du sitter i soffan och ser på tv.



Ringtäcket hjälper dig om du känner dig **orolig, stressad** eller **ensam**.



Fråga gärna din arbetsterapeut om du har frågor gällande ditt tyngdtäcke från Sleepify.

# Ringtäcket

# Tvättanvisningar



1. Dela alltid täcket i två delar med hjälp av dragkedjan.



2. Lägg ringtäcket i den medföljande tvättpåsen.



3. Tvätta ringtäcket i 60 grader på ett skonsamt program med låg centrifugering.



4. Häng upp ringtäcket på tork så torkar det snabbare.



5. Använd inte torktumlare för att torka ditt ringtäck.